

採取容器変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび、下記検査項目の試薬変更に伴いまして、採取容器が
変更となりますので、ご案内申し上げます。
何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■ 実施日 2021年4月1日(木) ご依頼分より

■ 対象項目 28878 便中ヘリコバクターピロリ抗原

■ 容器

	新	現
記号	F20	F70
旧記号	d4	d7
内容	ほう酸1mL	リン酸バッファー1.0mL
貯蔵方法	室温	室温
有効期限	製造から1年	製造から1年



<p>採取方法</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. (準備) 容器の白ラベルを途中まではがし氏名・日付等を記入し、また巻いてください。ピンクの採便棒を回して引き抜いてください。 2. (便をとる) 採便棒先端の溝すべてが便でうまるように、便の表面をこすり取ってください。 3. (便をとったあと) 採便棒を容器にもどして根元までしっかりねじ込んでください。再び開けないでください。 4. (保管上の注意) 添付のビニール袋に入れて提出まで冷暗所に保管してください。採便後は、すみやかに提出してください。 <p>(注) 出来るだけ新しい便を提出してください。</p> <p>(注) 採便容器の緑キャップは、絶対にはずしたり、ゆるめたりしないでください。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 採取ブラシの柄に巻かれたラベルを広げて所定事項を記入し、もとのとおり巻きつけてください。 2. 採取ブラシを便に突き刺し、ブラシのあいだに便が入るようにブラシを回転させながらとってください。 3. 採取ブラシを、アルミシールを剥がした容器に差し込む、しっかりねじ込んで軽く5～6回振ってください。 4. 容器を添付のビニール袋に入れて冷暗所に保管し、速やかにご提出ください。 <p>(注) 青キャップは絶対にはずさないでください。</p>
<p>容器</p>	 <p>The image shows a blue collection container with a white label. The label has a table for recording patient information. The table has columns for '年齢' (Age), '性別' (Gender), and '採便日' (Collection Date). The gender column has '男' (Male) and '女' (Female) options. The date column has '年' (Year), '月' (Month), and '日' (Day) options. A pink brush is attached to the container. The brush has a pink handle and a white head with a green cap. The label also has a section for '氏名' (Name) and '採便日' (Collection Date).</p>	 <p>The image shows a blue collection container with a white label. The label has a table for recording patient information. The table has columns for '年齢' (Age), '性別' (Gender), and '採取日' (Collection Date). The gender column has '男' (Male) and '女' (Female) options. The date column has '年' (Year), '月' (Month), and '日' (Day) options. A blue brush is attached to the container. The brush has a blue handle and a white head with a blue cap. The label also has a section for '氏名' (Name) and '採取日' (Collection Date).</p>

※旧容器にてご依頼の場合、参考値となります。